


# 銀イオン空涼マスク 接客・商談に!

銀イオン空涼マスクはAg+マスク除菌シートと専用マスクがセットになった商品です。マスクが持っている欠点【息苦しい・声がこもる・不潔・臭う・暑い】に対応した画期的なマスクです。※特許・意匠出願中

**【飛沫防止、除菌・消臭・呼吸が楽で声がこもらない】**

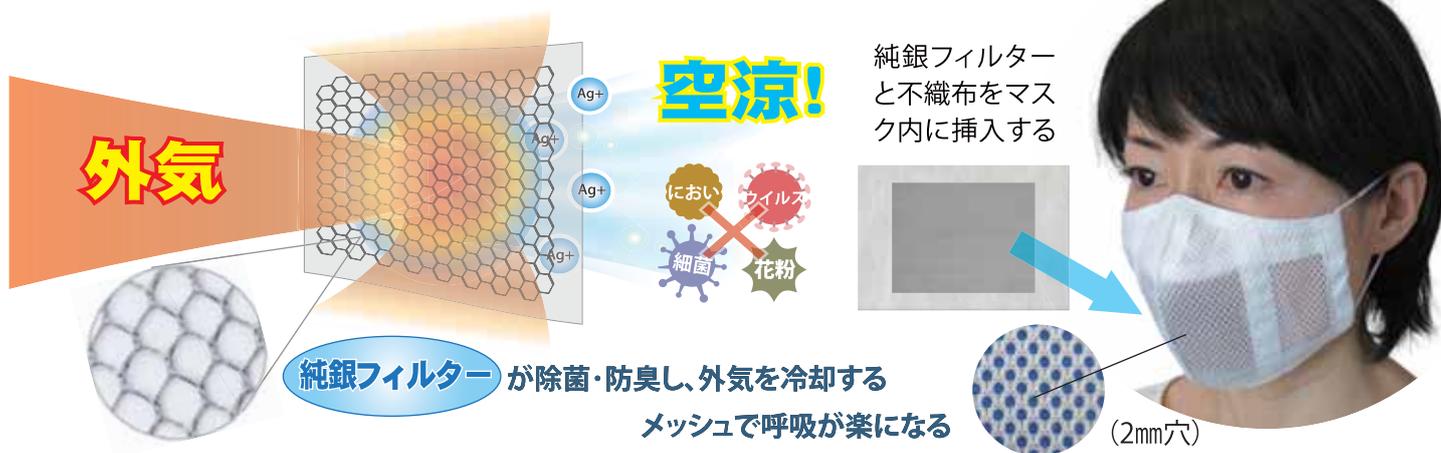

## 【3つの空涼効果で快適】

- 1 銀は最も熱伝導率の高い金属のため、外気の熱が純銀フィルターを通過すると放熱され、吸入時に温度が下がる。
- 2 マスク本体は2mm穴のメッシュ素材で、通気性がよくマスク内に熱がこもりにくい。声がこもらず会話が楽になる。
- 3 マスクの両サイドに排気用の窓を開けており、息を吐く時に窓から空気がぬけるので運動の際、呼吸が楽になる。

### 【マスク性能】

- マスクが蒸れない
- 通気性があり呼吸が楽
- 声がこもらない
- 軽量で耳への負担軽減
- マスクが臭わない
- 除菌でマスクが清潔
- 花粉・PM2.5を抑制

### 【マスク用途】


- 施設・飲食・店舗スタッフとして接客中に
- スポーツクラブなどやランニング中に
- テーマパークなどの遊戯施設内で
- カラオケボックスで歌うときに  
(マスクをしたままでも楽に歌えます)
- ライブやコンサートなどのイベントで
- 会議や商談中、工場や運送の作業中に、etc

## 【銀イオンで除菌・防臭・花粉対策 ●安心できる高機能3層構造】

純銀フィルターが銀イオンを発生し、雑菌やウイルス等を除菌し、消臭しますので、マスク内が清潔で**マスクが臭いません**。花粉やアレル物質も抑制するので呼吸が楽になります。

- 表地のメッシュは高い放熱・通気性
  - 純銀フィルターは空涼とマスク内を除菌・防臭
  - 不織布シートは飛沫を防止
- 3つ合わせても超軽量(8g)で重さを感じません

### メッシュ(放熱・通気) 純銀フィルター(空涼・除菌・防臭) 不織布シート(飛沫防止)

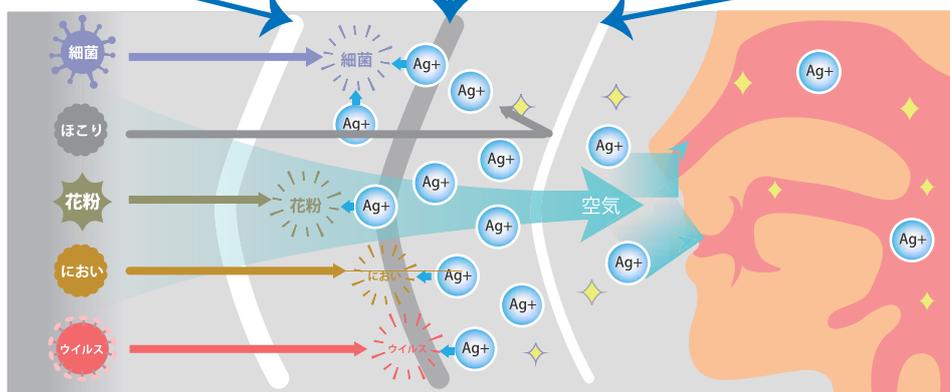

通気性が高いマスクは感染予防には適さない、しかし通気性が悪いと蒸れる、声がこもる、息苦しいなど日常生活に支障があります。銀イオン空涼マスクは純銀フィルターとメッシュマスクを組み合わせた3層構造で、飛沫防止、除菌・防臭、呼吸が楽にできる構造になっています。

## 銀イオン空涼マスクのセット内容と仕様

### 《銀イオン空涼マスクのセット内容》

専用布マスク1枚



純銀フィルター1枚



固定用テープ60枚



不織布シート30枚



### 《銀イオン空涼マスク(白色)の仕様》

素 材：マスク(表地ポリエステル100%、裏地綿100%)  
純銀フィルター(重量比 ナイロン70%、純銀30%)  
不織布シート(ポリプロピレン100%)  
固定用テープ(ウレタン不織布100%)

サ イ ズ：マスク(縦140×横210mm、重量 8g)  
純銀フィルター(縦70×横90mm、重量 0.2g)  
不織布シート(縦90×横130mm、重量 0.2g)  
固定用テープ(縦13×横30mm、重量 0.05g)

使用期限：マスク(繰り返し使用、洗濯機可)  
純銀フィルター(30回食器用洗剤にて毎回洗浄)  
不織布シート(30回1回につき1枚※使い捨て)  
固定用テープ(30回1回につき2枚※使い捨て)

保管方法：純銀フィルターを1週間以上使用しない場合は  
パッケージの気密袋に封入して保管

原 産 国：日本製(素材・縫製はすべて日本製)

## 銀イオン空涼マスクの価格と使用方法やメンテナンス

### 銀イオン空涼マスク

メーカー希望小売価格 3,000円 (税込3,300円) / セット

### 空涼マスク単品 (洗替用)

メーカー希望小売価格 1,700円 (税込1,870円) / 枚

### Ag+マスク除菌シート

メーカー希望小売価格 1,500円 (税込1,650円) / 個 30日分

### 【メンテナンス】

- ① 空涼マスクは洗濯ネットに入れて洗濯できます。  
銀イオンで除菌・消臭されるので、マスクは臭いませんが、定期的に洗濯願います。
- ② 純銀メッシュは毎回食器用洗剤で軽く洗浄してください。30回の使用を目安に効果が低下するため交換が必要です。Ag+マスク除菌シート(税込価格1650円)をお買い替え願います。

※安全性の高い銀を使用していますが、肌に金属アレルギーが起きた場合はすみやかに使用を中止して下さい。

### 【使用方法】

- ① 純銀フィルターを食器用洗剤で洗う(使い始めは必ず洗ってください。)
- ② 不織布シートに純銀フィルターを付属のテープで固定する。
- ③ ②をマスク内側の上下のひだに、上から先に挟んで取り付ける。  
※不織布シートが口に当たるようにする。
- ④ 挟み終わったらマスクを二つに折って、②をマスクになじませる。
- ⑤ マスクのゴムひもの長さはゆるめ※に調整する。  
※ゆるめの方が通気性がよくなる。軽量なのでゆるめでもマスクはずれにくい。



シートを裏返してからマスクの内側に挿入



上から先にシートを挿入



ゆるめに長さを調整

### ●お問い合わせ

製造販売元

MEDICAL-AID CO.,LTD.  
メディカル・エイド株式会社  
〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 3-1-11  
medical-aid Tel:0725-53-3270 Fax:0725-53-5337

<http://www.medical-aid.co.jp/>

販売代理店 ●ご購入、お取引に関するお問い合わせ