

Ag+マスク除菌シートをサージカルテープで固定

Ag+マスク除菌シートはすべてのマスクに対応するように純銀メッシュと不織布シートのサイズを決定しております。マスクに固定する方法として市販のサージカルテープをご利用ください。

- ① 純銀フィルターは錆び止め加工をしておりますので、使い始めに食器用洗剤で洗って下さい。
- ② 洗浄後、濡れたまま純銀フィルターを不織布上に置いて、両サイドをテープで固定して下さい。※濡らすと銀イオンが発生しやすくなります。
- ③ 上記を裏返してマスクの上に置き、テープで両サイドの上部に貼り付けて不織布とマスクを固定してください。
- ④ Ag+マスク除菌シートを使用した後は、口元に付いた油や汚れが純銀フィルターについておりますので、使用後または使用前に食器用洗剤で洗浄して下さい。

- ⑤ 純銀フィルターの有効使用回数は30回(不織布は毎回交換)となっておりますので、ご使用期限をお守りください。


※ 1週間以上ご使用しない場合は、純銀フィルターを食器用洗剤で洗浄した後、劣化防止のため、必ずパッケージの気密袋に封入して保管して下さい。

- 純銀フィルターを食器用洗剤で洗う



※ 使用前または使用後は毎回洗って下さい

- 純銀フィルターを不織布の上に置きテープで固定

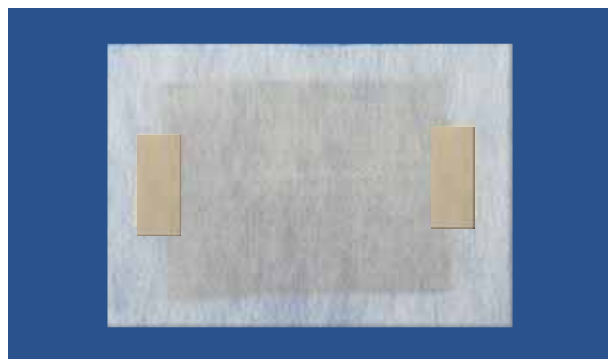

※ 純銀フィルターは濡れたまま使用してください

- 上記のシートを裏返してマスクの上に重ねテープで固定

